

ArthroHyal[®] Inject

- 1 спринцовка от 2.0 ml -

Висока концентрация: 44 mg натриев
хиалуронат в стерилна, предварително
напълнена спринцовка
Медицинско изделие

44 mg НАТРИЕВ ХИАЛУРОНАТ

2.2% ВЪТРЕСТАВЕН ГЕЛ



- **Високо молекулярно тегло:** 1.7 mln. Daltons
- **Неалергенни:** натриев хиалуронат от бактериална ферментация
- **Подобрява вискоеластичните свойства на синовиалната течност**
- **Впечатляващо намаляване на болката**
- **За всички синовиални стави**
- **Трайност на ефекта:** до 12 месеца



CE 0481

ArthroHyal[®] Inject

ВЪТРЕСТАВЕН ГЕЛ

Състав

1 ml разтвор съдържа 22.0 mg натриев хиалуронат от бактериална ферментация, слаб, стерилен, изотоничен и апирогенен фосфатен буферен разтвор при pH 7.2 и вода за инжектиране.

Произход

Продуктът съдържа натриев хиалуронат 2.2% от бактериална ферментация и се използва за подобряване на вискозитета на вътреставната съединителна тъкан. Претърпял е стерилизация с влажна топлина за инжекционни продукти и е апирогенен.

Терапевтични случаи

При болка и ограничена подвижност на ставите, при наличие на дегенеративни и травматични промени в колянната става и други синовиални стави.

Приложение и дозировка

Продуктът е предназначен за вътреставно инжектиране веднъж седмично за общо 3

вътреставни инжекции. Полезните ефекти от лечението с 3 вътреставни инжекции се поддържат поне 6 месеца; цикълът на лечение може да се повтори според нуждите. Да се държи далеч от деца.

Свойства и начин на действие

Синовиалната течност съдържа хиалуронова киселина, вещество, което осигурява вискоеластичността на флуида и позволява безболезнени физиологични движения благодарение на смазочните и удароустойчиви свойства. Освен това, синовиалната течност доставя хранителни вещества към хрущяла. При наличие на дегенеративно заболяване вискоеластичността на синовиалната течност значително се намалява, което ограничава подвижността на ставите, причинява болка и предизвиква разрушаване на хрущяла. Още след един цикъл на лечение от 3 вътреставни инжекции мобилността и смазването на ставата се подобряват и болката от дегенеративните лезии намалява.

Без глутен ✓ Без лактоза ✓ Без пшеница ✓ Без мая ✓ Без соя ✓ Без свинско ✓

Всички ArthroLine продукти са подходящи за атлети:
Продуктите не съдържат забранени или контролирани вещества.

Технически данни

Натриев хиалуронат	2.2 %
Молекулярно тегло	1.7 mln. Daltons
Вискозитет	ca. 300 000 mPas
Осмоларитет	270 - 400 mOsm/kg
Съхранение	2-25°C
pH	6.8 - 7.4
Обем	2.0 ml

Формула (1 ml)

Натриев хиалуронат	22.000 mg
Натриев хлорид 0.9%	8.500 mg
Динатриев хидрогенфосфат 2 H ₂ O	0.563 mg
Натриев дихидрогенфосфат 2 H ₂ O	0.045 mg
Вода за инжектиране	
Една инжекция съдържа 2ml разтвор.	
Разтворът е стерилизиран чрез овлажнена топлина.	
Срок на годност преди отваряне: 3 1/2 години	