

Холестерол

Бърз тест за определяне на повишени стойности на холестерол

3 МИН.



Точност
> 96 %



Рискът за Вашите кръвоносни съдове: холестерол

Холестеролът се синтезира в черния дроб и играе важна роля в различни телесни функции, например за изграждане на клетъчни мембрани. Повишеното ниво на холестерол обаче е рисков фактор за възникване на атеросклероза (втвърдяване на артериите). Това често остава незабелязано до достигане на напреднал стадий. Атеросклерозата на коронарните артерии води до влошаване на кръвоснабдяването на сърдечния мускул, до съдова оклузия и сърдечен инфаркт.

Разберете своето състояние: бърз тест за холестерол

С този тест бързо и надеждно можете да определите своето ниво на холестерол. При повишени стойности се консултирайте със своя лекар за ползите от промяна на хранителния режим и начина на живот.

Колко надежден е тестът Veroval®?

Бързият тест за холестерол е разработен с цел прилагането на точността и сигурността на съвременната диагностика и за лична употреба в домашни условия. Той се основава върху измерване на стойностите на холестерол в кръвта и с това отговаря на съвременните медицински стандарти. **Точността на теста, доказана чрез проучвания за оценка на ефективността, е над 96 %.**

Данни за ефективността:

В рамките на едно проучване с бърз тест за холестерол са определени стойностите на холестерол от 150 кръвни проби. Стойностите на съответното цветно поле съответстват на 96,6 % с определените по референтния метод в лаборатория. Затова този тест е подходящ за бързи измервания на общия холестерол.

Сложно ли е провеждането на теста?

Не: всичко, от което се нуждаете, са добре измити ръце, часовник и една маса с равна повърхност. Точното противане на теста е описано на задната страница.

За какво трябва да внимавам?

Съхранение:

- Съхранявайте теста и всички компоненти при 4 °C до 30 °C.

Годност:

- Вижте датата на изтичане на годността върху опаковката от фолио на касетата за тест и върху външната опаковка.

Точност:

- Точността на теста, доказана чрез проучвания за оценка на ефективността, е над 96 %.

Приложение:

- За да определите своята стойност на холестерол, не трябва да ядете и пиеете 12 часа преди провеждането на теста.
- Преди да тествате своята стойност на холестерол, изчакайте около 3 месеца след временност или тежко заболяване и около 3 седмици след леко заболяване.
- Не използвайте, ако опаковката от фолио е отворена или компонентите са повредени.

Извхвърляне на отпадъци:

- Всички компоненти могат да бъдат изхвърлени в домакинските отпадъци.
- Изсушителят в опаковката от фолио също може да бъде изхвърлен.

Моля, обърнете внимание:

- Съставните части на теста трябва да бъдат третирани като потенциално опасни материали, от които обаче не произтича опасност, ако бъдат използвани съгласно ръководството за употреба.

Важно указание:

Приемете резултатите сериозно, въпреки че еднократно повишената стойност не е показателна. Окончателното диагностициране трябва винаги да се извърши заедно с лекар. За да бъдат разпознати своевременно повишените нива на холестерол в кръвта, препоръчително е да имате под ръка бърз тест за определяне на повишените нива на холестерол, за да можете редовно да проверявате стойностите.

www.veroval.bg

 Спазвайте ръководството за употреба!
Моля, съхранявайте теста на място недостъпно за деца!
Не използвайте теста след датата на изтичане на годността.
Съхранявайте компонентите на теста при 4 °C до 30 °C.

 Използвайте теста и автоматичното средство за пробождане само 1 път.
Не използвайте повредено автоматично средство за пробождане само 1 път.
Не разглобявайте тест диска.
Тестът е само за външно приложение.
Инвирто диагностика за самостоятелно приложение.

 Автоматично средство за пробождане
Owen Mumford Ltd.,
Brook Hill Woodstock,
Oxfordshire, OX20 1TU UK

 0120

 STERILE R

 CARE diagnostica Produktions- und
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Römerstraße 8
AT-2513 Möllersdorf

 0483

Представител:
BG – PAUL HARTMANN Sofia 1113,
25A Major Yuri Gagarin Str., fl.1
Tel.: 02/ 964 18 20

ZANL0003-BG-Vero
Rev.00 2016-03-04



Veroval®

ДОМАШЕН ТЕСТ




Холестерол – бърз тест

Начин на провеждане:






Съдържание


- 1 опаковка от фолио с тест диск и изсушител (1)
- 2 автоматични средства за пробождане (1 резервно) със стерилен ланцет за вземане на кръвна прoba (2)
- 1 пластир (3)
- 1 ръководство за употреба

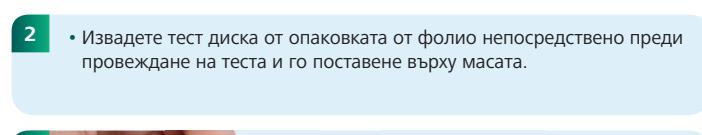

- Завъртете сивата капачка на автоматичното средство за пробождане (2), докато тя се освободи. След това направете още 2 оборота.
- Притиснете средството за пробождане с кръглия отвор спрещу страничната част на върха на пръста (а) и натиснете механизма (б).

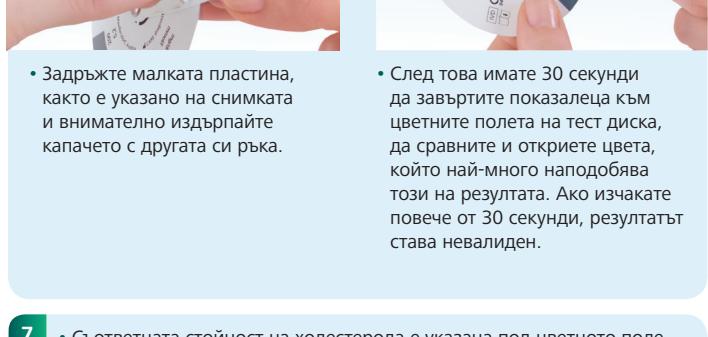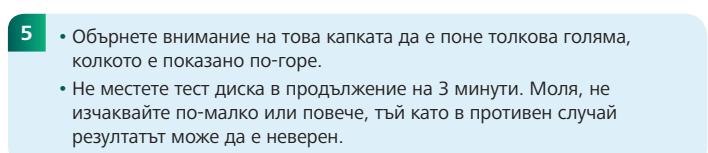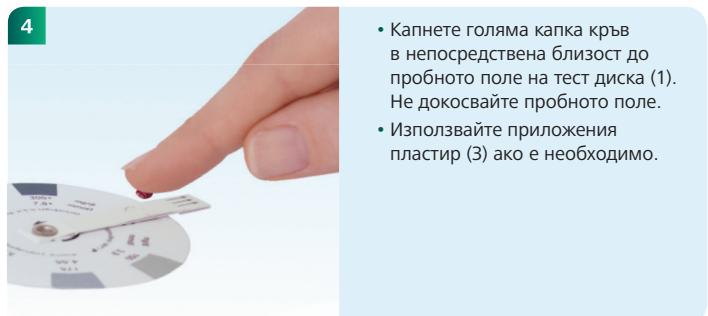

- Съответната стойност на холестерола е указана под цветното поле. Резултатът от теста може да бъде отчетен в mg/dl (милограми на децилитър) и в mmol/l (милимола на литър).
- Ако в точката на резултат има по-тъмни и по-светли петна, вземете решение по това кои като цяло са по-големи. Малките червенени кафявки петна означават, че червените кръвни клетки са проникнали в точката на резултата. Тези петна могат да бъдат игнорирани.

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

Нормални стойности

150 175 200

За нормални стойности при възрастни се считат стойности до 200 mg/dl (5,2 mmol/l). Вашата стойност с висока вероятност е в този диапазон, когато при тестването се получат стойности до 200 mg/dl.

Повишени стойности

225 250 300+

За повишени се считат стойности над 200 mg/dl (5,2 mmol/l). Вашата стойност с висока вероятност е в повишения диапазон, когато бъдат отчетени стойности над 200 mg/dl. (Това е в сила и когато трудно може да се разграничи между полетата за 200 mg/dl и 225 mg/dl.) При повишена стойност, незабавно посетете своя лекар за по-точно определяне на стойността на холестерола.

Невалиден резултат



Тестът е невалиден, ако няма зеленикаво оцветяване в точката на резултата. Причини за това могат да бъдат повредена опаковка от фолио, повреден слой на разделение на кръвта, неправилно съхранение или грешка при употреба. В такъв случай, моля съберете всички тестови материали и се обърнете към ТП Хартман Рико, гр. София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ 25А или се свържете с нас през контактната форма на www.hartmann.bg

В този тест се използват ензимите холестерол естераза, холестерол оксидаза и пероксидаза, за да се активира оцветител, при което промяната на цвета е пропорционална на общия холестерол в кръвта.

Известни са следните фактори, които могат да повлият на резултата:

- Хемоглобин >200 mg/dl и билирубин > 42 mg/dl.
- В повишени количества аскорбиновата киселина (витамин C), алфа-метилдопа или новалгин водят до привидно по-ниски стойности.
- Стойността на хематокрита влияе върху резултата в обратна зависимост.
- Повишени стойности на билирубин могат да причинят по-нисък резултат.
- Стероидите като епиандростерон, дехидроепиандростерон, кампестерол или ситостерол фалшифицират резултата, когато са налице в необичайни концентрации.
- Медикаменти, диета, стрес, захарен диабет, тежко заболяване и бременност. Преди да тествате своята стойност на холестерол, изчакайте около 3 месеца след бременност или тежко заболяване и около 3 седмици след леко заболяване.