

Инсталайф- наколенка за облекчаване на болка в долната част на гърба



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Унисекс наколенка;
- Регулируема;
- Подходяща за всякакви размери.

ЕЛЕМЕНТИ

1. Акупресурна възглавничка
2. Регулируема ластична лента
3. Регулируема ластична странична лента
4. Халка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

облекчава болки в долната част на гърба, асоциирани с:

- a. Хронична болка в долната част на гърба;
- b. Ишиас (болка в кръста и по-надолу, която се дължи на възпален седалишен нерв);
- c. Пириформис синдром (Piriformis syndrome).

ВНИМАНИЕ

- Не носете **Instalife** върху двата крака едновременно.
- При необходимост преди употребата на **Instalife** се консултирайте с Вашия лекар.
- Има хора могат да бъдат алергични към неопрен. Ако усетите раздразнение на кожата, прекратете употребата на продукта и се консултирайте с лекар.
- Ако след употреба на продукта, усещате краката си измозени, болката в гърба продължава или дори се увеличава, преустановете употребата на **Instalife** и се консултирайте с лекар.

СТЪПКА 1: Определете на кой крак ще носите **Instalife**.

Ако болката в гърба Ви е от дясната страна, тогава носете **Instalife** на десния крак. Ако болката в гърба е от ляво- носете **Instalife** на левия крак. Ако болката е по средата, опитайте се да определите към коя страна се доближава повече- към лявата или към дясната. Ако болката е точно в средата, първоначално носете **Instalife** на десния крак и в случай, че не получите желаното облекчение, го преместете на левия.

Фиг. А



СТЪПКА 2: Разтворете наколенката **Instalife** чрез разлепяне на регулируемата лепенка.(2) и страничните лепенки(3).

СТЪПКА 3: Поставете **Instalife** под коляното. Акупресурната възглавничка (1) трябва да бъде в центъра на пресеца, както е показано на фиг.А.

СТЪПКА 4 : Стегнете **Instalife** чрез вкарване на регулируемата лепенка (2) през халката (4). Издърпайте и затегнете колкото е необходимо. Наколенката трябва да обхваща плътно крака и акупресурната възглавничка задължително да бъде точно в средата на пресеца.

Instalife трябва да бъде плътно по крака, но не и да причинява дискомфортно, болезнено стягане. Ако усетите дискомфорт поради прекалено стягане, отхлабете малко

ВНИМАНИЕ: **Instalife** не трябва да се носи повече от 2 часа при първата употреба. Ако се чувствате комфортно, следващите пъти увеличавайте времето на носене.

СЪСТАВ: Вътрешен слой: 100% неопрен; Горна част: 100% полиестер; Долна част: 98% полиестер, 2% полиамид.

ПОДДРЪЖКА: Перете на ръка. Не го подлагайте на сушене на центрофуга. Не го гладете. Не избелвайте.

Продуктът притежава 14 дневна гаранция срещу фабрични дефекти. Тя не покрива дефекти, появили се в следствие на неправилна употреба, прекомерно износване, нехайно отношение или инциденти.

Произведени Китай
Производител: Industex S.L., Барселона



Предоставено от СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ ЕООД

тел. 02/ 9 15 25 тел. 02/ 437 22 77
www.telestar.bg www.tvboutique.bg

info@skyshop.bg

НАШИТЕ МАГАЗИНИ

гр. София, бул. Васил Левски 67
гр. София, бул. Христо Ботев 21
гр. София, Serdika Center, ниво -1
гр. София, The Mall, ниво -2
гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 19 (бившата Заимов)
гр. Варна, бул. Цар Освободител 39
гр. Бургас, пл. Св. Кирил и Методий 9